

# 692

## Rampas dobráveis

Subir uma scooter ou uma cadeira de rodas no carro fica fácil graças às rampas. Essas rampas dobráveis garantem que possa colocar com segurança scooters e cadeiras de rodas pesadas no seu veículo.



*Inclui bolsa para armazenamento.  
Um conjunto contém duas rampas.*




By Vitor Soeiro



Imagens para fins ilustrativos. Algumas características podem ser opcionais.

# Novos Horizontes

# Informações técnicas 692

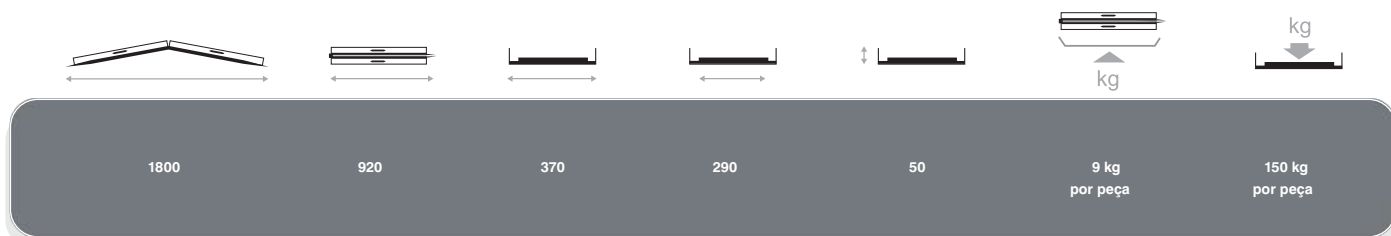

Desvios de peso e medidas (15 mm e 1,5 kgs) são possíveis

**01** Pega para manuseio fácil

**02** Superfície antiderrapante para melhor tração da cadeira ou scooter

**03** Carga máxima de 150 kg por rampa

## Usando as rampas

As rampas são fáceis de usar:

1. Desdobre a rampa.
2. Coloque a parte antiderrapante sobre a superfície a ser acessada.
3. Certifique-se de que as rampas estão estáveis.
4. Suba com a scooter ou a cadeira de rodas pelas rampas.

**04** Equipadas com revestimento antiderrapante para melhorar a aderência das rampas



## Vermeiren Ibérica SLU

Estrada de Cartellà, Km. 0,5 Sant Gregori Parque Industrial - Edifício A  
17150 Sant Gregori (Girona)

Tel. +34 972 428 433

[www.vermeiren.es](http://www.vermeiren.es) - [info@vermeiren.es](mailto:info@vermeiren.es)

Para mais informações, entre em contato com o seu distribuidor local.



By Vitor Soeiro



**VERMEIREN**  
Novos Horizontes



Sujeito a modificações técnicas.