

Manual de instalação

Kuarz



Sumário

Prefácio	4
1. Sobre o produto	5
2. Itens inclusos	6
3. Montagem e ajustes	6
3.1. Ferramentas	7
3.2. Altura do assento	8
3.3. Trocar a bateria	8
3.4. Substituição de rodas ou pneus	10

Prefácio

Aviso importante





Para facilitar a instalação e os reparos deste scooter, apresentamos este manual de instalação. Leia com atenção. Caso ainda reste alguma dúvida após a leitura, não hesite em contatar a Vermeiren.

As imagens do produto são utilizadas para facilitar a compreensão das instruções. Os detalhes mostrados podem variar em relação ao seu produto.

Informações disponíveis

No nosso site <http://www.vermeiren.com/> você sempre encontrará a versão mais atualizada das informações deste manual. Consulte o site regularmente para possíveis atualizações.

Pessoas com deficiência visual podem baixar a versão eletrônica deste manual e utilizar softwares de leitura de texto para ouvi-lo.

	Manual do utilizador Para utilizador e revendedor especializado
	Instruções de instalação Para revendedor especializado
	Ilustrações das peças (sobressalentes) Para revendedor especializado
	Declaração de conformidade CE

1. Este produto



1. Apoio cabeça
2. Encosto
3. Apoio braço
4. Assento
5. Rodas traseiras
6. Plataforma pés
7. Rodas frente
8. Luz frente
9. Luz pisca
10. Espelho retrovisor

11. Alavanca velocidade
12. Punhos
13. Alavanca roda livre
14. Luz traseira
15. Anti-volteio
16. Placa identificação

2. Itens incluídos na entrega

Os seguintes componentes fazem parte da entrega:

- Estrutura com sistema de direção, rodas traseiras e dianteiras, apoio para os pés
- Assento com encosto e apoio de cabeça
- Opções
- Manual
- Baterias

Antes de utilizar, verifique se todos os itens foram entregues e se não há nenhum produto danificado.

Observe que a configuração padrão pode variar entre os países europeus. Consulte o revendedor especializado.

3. Montagem e ajustes

ATENÇÃO

Risco de ferimentos ou danos

- Utilize somente as configurações indicadas neste manual.
- Utilize apenas peças descritas neste manual.
- Use apenas peças originais ou de reposição aprovadas pela Vermeiren.
- Evite que outras pessoas tenham acesso à área de trabalho.
- Mantenha o local de montagem/desmontagem limpo e organizado para evitar acidentes.
- Guarde todas as peças pequenas em uma caixa ou bolsa.
- Durante a montagem, desmontagem e uso do scooter, certifique-se de que nenhum objeto ou parte do corpo fique preso entre as partes móveis. Atenção especial à posição dos cabos.

- Desligue a scooter antes de realizar qualquer ajuste mecânico e certifique-se de que a alavanca do modo livre esteja na posição de freio. **EN**
- Certifique-se de que todos os parafusos estejam bem apertados antes de utilizar a scooter. 7
- Alterações no software só podem ser feitas por profissionais qualificados, levando em consideração o utilizador e o ambiente (estabilidade, aceleração, uso interno/externo, etc.).
Leia o manual do utilizador desta scooter. Fique atento aos detalhes técnicos e aos limites de uso recomendados. Para mais informações, entre em contato com a Vermeiren.

3.1. Ferramentas

Para montar, desmontar ou ajustar a scooter, você vai precisar das seguintes ferramentas:

- Chave de boca nº 13
- Chave Allen nº 5

3.2. Altura do assento



1. Remova o assento.
2. Para facilitar o acesso, também é possível retirar a capa plástica da estrutura.
3. Remova o pino de trava (2) e solte parafuso (4).
4. Ajuste o suporte do assento para a altura desejada.
5. Recoloque o pino de trava e aperte o parafuso.
6. Recoloque o assento.

3.3. Troca da bateria

Atenção

Risco de ferimentos ou danos

- As baterias devem ser substituídas somente por profissionais qualificados.
- Evite contato com o ácido das baterias.
- Troque as baterias em locais bem ventilados.
- Certifique-se de que os orifícios de ventilação do compartimento da bateria estejam limpos e sem obstruções.
- Leia primeiro as instruções de recarga no manual do utilizador antes de carregar as baterias.
- Não coloque os dedos entre as baterias e o compartimento.

Troque ambas as baterias ao mesmo tempo e utilize o mesmo tipo já usado na scooter. Se não for possível, procure a unidade Vermeiren mais próxima.

A fiação e o carregador estão posicionados corretamente na scooter. Não tente alterar o local da fiação por conta própria. Uma instalação inadequada pode acabar prensando os fios entre o compartimento da bateria, o que pode causar falhas no sistema eletrônico do seu scooter.

Certifique-se de que os cabos da bateria estejam conectados à bateria correta.

1. Desligue a scooter.
2. Remova o assento, consulte o manual do utilizador.
3. Retire a tampa plástica traseira para acessar as baterias.
4. Afrouxe o parafuso com a alavanca e retire o suporte que mantém as baterias no lugar.
5. Desconecte todos os plugs das baterias antes de remover os conectores dos polos.
6. Retire as baterias do compartimento.
7. Coloque as novas baterias e conecte aos plugs correspondentes (plugs da mesma cor devem ser conectados juntos).
8. Certifique-se de que os cabos estejam bem posicionados.
9. Recoloque o suporte e aperte o parafuso com a alavanca para fixar as baterias. As baterias não devem se mover, mesmo durante o uso.
10. Reinstale a tampa plástica traseira.
11. Recoloque o assento.

3.4. Troca de rodas ou pneus

ATENÇÃO

Risco de ferimentos ou danos


- Certifique-se de que todo o ar foi retirado do pneu antes de removê-lo.
- Garanta que nenhuma parte do corpo, a câmara de ar ou outros objetos fiquem presos entre o pneu e a roda.
- Manuseie com cuidado para evitar danos à roda.

Substitua a câmara de ar e, se necessário, o pneu também.

Encha o pneu utilizando um equipamento de enchimento que esteja em conformidade com as normas e que tenha indicação de pressão em “bar”.

Verifique se a pressão está correta, consultando a indicação de pressão nos próprios pneus.

1. Eleve a roda motriz do solo com o auxílio de um macaco.
2. Retire a tampa da roda usando uma chave de fenda.
3. Remova o parafuso (23) para tirar a roda.
4. Desparafuse os parafusos de fixação (24) e retire a roda da flange.
5. Abra a válvula do pneu e pressione suavemente para libertar o ar.
6. Afrouxe os 5 parafusos que unem as duas metades do aro (no lado interno do aro).
7. Separe as metades do aro e retire a câmara de ar do pneu.
8. Encha parcialmente a câmara de ar nova ou reparada.
9. Coloque a câmara dentro do pneu.
10. Reposicione as duas metades do aro no pneu, garantindo que a válvula da câmara fique visível na abertura do aro.
11. Una as metades do aro com os 5 parafusos e aperte manualmente.
12. Encha o pneu com a pressão correta, conforme indicado no pneu.
13. Monte a roda e aperte o parafuso (23).
14. Abaixee o macaco.
15. Certifique-se de que os parafusos estejam bem fixados.
16. Recoloque as tampas no lugar.

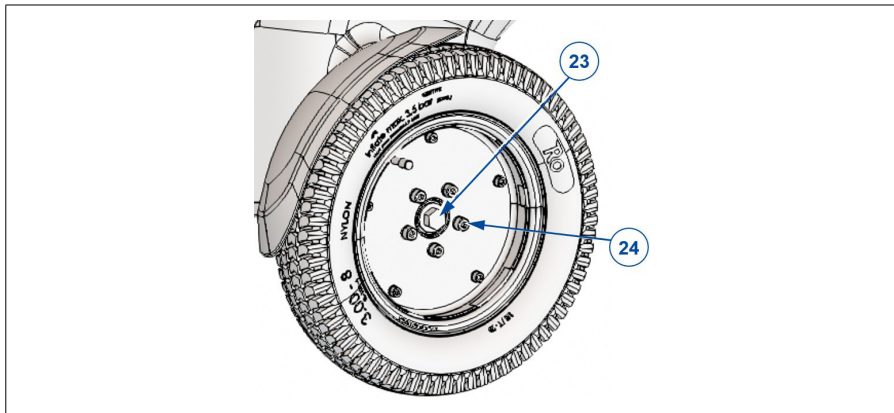



GRUPO VERMEIREN

Vermeirenplein 1/15

2920 Kalmthout

Bélgica

www.vermeiren.com

Versão: A, 2026-02

UDI-DI Básico: 5415174KuarzDU

Todos os direitos reservados, inclusive para traduções.

VERMEIREN
we care for you