

Manual de Instalação

Sync



CE



Prefácio	4
1. Este produto	5
2. Conteúdo da embalagem	6
3. Montagem e ajustes	6
3.1. Ferramentas	7
3.2. Altura do assento	7
3.3. Substituição da bateria	8
3.4. Substituição das rodas ou dos pneus	9

Prefácio

Nota importante





Para o apoiar na instalação e reparação desta scooter, disponibilizamos este manual de instalação. Leia-o atentamente. Se, após a leitura deste manual, ainda tiver dúvidas, não hesite em contactar a Vermeiren.

As imagens do produto são utilizadas para clarificar as instruções. Os detalhes do produto apresentado podem diferir do seu produto.

Informação disponível

No nosso website <http://www.vermeiren.com/> encontrará sempre a versão mais recente da informação contida neste manual. Consulte este website regularmente para possíveis atualizações.

As pessoas com deficiência visual podem descarregar a versão eletrónica deste manual e ouvi-la através de uma aplicação de software de conversão de texto em fala.

	Manual do utilizador Para o utilizador e o distribuidor especializado
	Instruções de instalação Para o distribuidor especializado
	Desenhos de peças sobresselentes Para o distribuidor especializado
	Declaração CE de conformidade

1. Este produto



1. Apoio de cabeça
2. Encosto
3. Apoio de braço / almofada do apoio de braço
4. Assento
5. Rodas traseiras
6. Plataforma para os pés
7. Rodas dianteiras
8. Luz dianteira
9. Luzes indicadoras
10. Espelho retrovisor
11. Alavanca de velocidade
12. Punhos
13. Cesto
14. Alavanca de roda livre
15. Luz traseira
16. Anti-volteio
17. Placa de identificação

2. Conteúdo da embalagem

Os seguintes componentes fazem parte da entrega:

- Estrutura com unidade de direção, rodas traseiras e dianteiras, plataforma para os pés
- Assento com encosto e apoio de cabeça
- Opções
- Manual
- Baterias

Antes da utilização, verifique se está tudo incluído e se nenhum produto está danificado.

Tenha em atenção que a configuração básica pode diferir entre os vários países europeus. Contacte o seu distribuidor especializado..

3. Montagem e ajustes

CUIDADO

Risco de ferimentos ou danos

- Utilize apenas as definições descritas neste manual.
- Utilize apenas as peças descritas neste manual.
- Utilize apenas peças sobresselentes ou de substituição originais aprovadas pela Vermeiren.
- Impeça que pessoas não autorizadas acedam à área de trabalho.
- Mantenha a área de montagem/desmontagem limpa e arrumada, para evitar quedas.
- Recolha todas as peças pequenas numa caixa ou saco.
- Durante a montagem/desmontagem e utilização da scooter, certifique-se de que nenhum objeto ou parte do corpo fica preso entre as peças móveis. Preste especial atenção à posição dos cabos.
- Desligue a scooter antes de efetuar quaisquer ajustes mecânicos e certifique-se de que a alavanca de roda livre está na posição de travagem.
- Certifique-se de que todos os parafusos estão bem apertados antes de conduzir.
- As alterações de software só são permitidas quando executadas por pessoal qualificado, tendo em conta o utilizador e o ambiente — estabilidade, aceleração, utilização interior/exterior, etc.

i Leia o manual do utilizador desta scooter. Tenha em atenção os detalhes técnicos e os limites da utilização prevista. Para mais informações, contacte a Vermeiren.

3.1. Ferramentas

Para montar/desmontar e ajustar a scooter, são necessárias as seguintes ferramentas:

- Chave no. 13
- Chave Allen no. 5

3.2. Altura do assento



1. Retire o assento.
2. Para facilitar o acesso, também é possível remover a cobertura plástica da estrutura.
3. Retire o pino de bloqueio (2) e desaperte o parafuso (4).
4. Levante/baixar o suporte do assento até à altura pretendida.
5. Volte a colocar o pino de bloqueio e aperte o parafuso.
6. Volte a colocar o assento.

3.3. Substituição da bateria

⚠ CUIDADO

Risco de ferimentos ou danos

- As baterias só devem ser substituídas por pessoal qualificado.
- Não entre em contacto com o ácido das baterias.
- Substitua as baterias numa divisão bem ventilada.
- Certifique-se de que os orifícios de ventilação do compartimento das baterias estão livres de qualquer contaminação.
- Antes de carregar as baterias, leia primeiro as instruções de carregamento no manual do utilizador.
- Não coloque os dedos entre as baterias e o compartimento das baterias.

i Substitua ambas as baterias ao mesmo tempo e por baterias do mesmo tipo das utilizadas na scooter. Se tal não for possível, contacte a instalação Vermeiren mais próxima.

A cablagem e o carregador estão corretamente posicionados na scooter. Não tente reposicionar a cablagem por si próprio. A instalação incorreta da cablagem pode resultar em fios presos na caixa das baterias, causando falhas no sistema eletrónico da scooter..

Certifique-se de que os cabos das baterias estão ligados à bateria correta.

1. Desligue a scooter.
2. Retire o assento, consulte o manual do utilizador.
3. Retire os parafusos da cobertura traseira, junto à plataforma para os pés.
4. Levante a cobertura plástica traseira para aceder às baterias.
5. Desaperte o parafuso com alavanca e retire o suporte utilizado para manter as baterias no lugar.
6. Retire os conectores dos polos.
7. Levante as baterias para fora do respetivo compartimento.
8. Substitua as baterias e volte a ligar os polos.
9. Certifique-se de que os cabos estão corretamente posicionados.
10. Volte a colocar o suporte e aperte o parafuso com alavanca para fixar as baterias no lugar. As baterias não devem mover-se, mesmo durante a condução.

11. Monte a cobertura plástica traseira e aperte os parafusos.
12. Volte a colocar o assento.

3.4. Substituição das rodas ou dos pneus

CUIDADO

Risco de ferimentos ou danos


- Certifique-se de que todo o ar foi libertado do pneu antes de o remover.
- Certifique-se de que nenhuma parte do corpo, a câmara de ar ou qualquer outro objeto fica preso entre o pneu e a jante.
- Manuseie com cuidado para evitar danos na jante.

Substitua a câmara de ar e, se necessário, também o pneu.

Encha o pneu utilizando equipamento de enchimento que esteja em conformidade com os regulamentos e que possua indicação de pressão em “bar”.

Certifique-se de que a pressão está correta; consulte a indicação de pressão nos pneus.

1. Levante a roda motriz do chão utilizando um macaco.
2. Retire o tampão da roda com uma chave de fendas.
3. Retire o parafuso (23) para remover a roda..
4. Retire os parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interior (24) e separe a roda da flange.
5. Abra a válvula do pneu e pressione-a suavemente para libertar o ar.
6. Separe as metades da jante e retire a câmara de ar do pneu..
7. Encha parcialmente a câmara de ar nova ou reparada.
8. Insira a câmara de ar no pneu.
9. Volte a colocar as duas metades da jante no pneu. Certifique-se de que a válvula da câmara de ar sai pela abertura da jante.
10. Una as metades da jante com os parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interior. Aperte manualmente.
11. Encha o pneu à pressão correta; consulte a indicação no pneu.
12. Monte a roda e aperte o parafuso (23).
13. Baixe o macaco
14. Certifique-se de que os parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interior estão bem apertados.
15. Volte a encaixar os tampões das rodas.

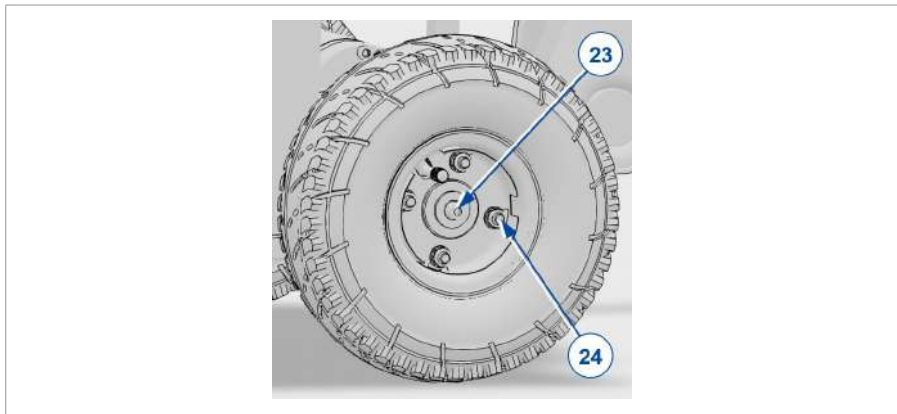



VERMEIREN GROUP

Vermeirenplein 1/15

2920 Kalmthout

Belgium

www.vermeiren.com

Version: A, 2026-03

Basic UDI-DI: 541517SyncE7

All rights reserved, including translation.



VERMEIREN
we care for you